

AEROresc®

Splints | Universalschienen



Immobilisation

Zur Ruhigstellung und Sicherung von Frakturen und Sportverletzungen

AERoresc® Universalschienen | -Sets

EASY Splints - Die Schienen für nahezu alle Einsatzbereiche

Die AERoresc® - EASY Splints sind Universalschienen, die sich zur Schienung nahezu aller menschlichen Gliedmaßen und der Halswirbelsäule eignen. Sie wurden aus einem sehr leichten und röntgenstrahlendurchlässigen Material entwickelt. Der Mantel besteht aus einem Kunststoffschaum (IPXE) - Patientenseite „Blau“ | Außenseite „Gelb“ - und der Kern aus einem weichen, modellierbaren Aluminiumgemisch, weshalb sie sich für die Schienung verschiedenster Verletzungen eignen.

AERoresc® - EASY Splints

Universalschienen für Behandlungen im Bereich der Immobilisation

Die Vorteile der EASY Splints:

- Flüssigkeitsabweisend (Blut, Sekret, Schweiß)
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Leicht und kompakt
- Roll- & faltbar
- Platzsparend
- Einsetzbar als Infusionsschiene (insb. in der Neonatologie & Pädiatrie)
- Wiederverwendbar
- Modellierbar
- Beliebig zuschneidbar
- Besonders günstig

Einsatzbereiche:

- Rettungsdienst
- Ambulanz
- Schulmedizin
- Sportmedizin
- Polizei
- Katastrophenschutz
- Outdoor
- Krankenhäuser
- Neonatologie
- Arbeitsmedizin
- Feuerwehr
- Militär
- Bergwacht
- u.v.m.

Die Modelle

EASY Splint Xtra Small / Finger

AERoresc® - IMT02-SP-XS

Bei dem XS-Splint handelt es sich um eine kleine Universalschiene, die sich ideal zur Ruhigstellung kleinerer, verletzter Gliedmaßen eignet.

Maße: 5 x 11 cm | Gewicht: 5 g



EASY Splint Medium | gerollt

AERoresc® - IMT02-SP-M

Ein Großteil aller Behandlungen in der Immobilisation können bereits mit unserer Medium-Variante abgedeckt werden.

Maße: 50 x 11 cm | Gewicht: 80 g



EASY Splint Xtra Large | gerollt

AERoresc® - IMT02-SP-XL

Das XL-Modell unseres Sortiments bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für die verschiedensten Schienungsarten.

Maße: 100 x 11 cm | Gewicht: 160 g



AERoresc® - EASY Splint Set1

AERoresc® - IMT02-SP-Set1

Die Vorteile des EASY Splint Sets:

- 3 unterschiedliche Größen in einem Set
- Platzsparend und leicht - Passt in jedes Notfallbehältnis
- Ausgestattet für nahezu alle Notfallsituationen

Das AERoresc® - Easy Splint Set1 beinhaltet:


- 2 x EASY Splint Xtra Small / Finger
- 1 x EASY Splint Medium
- 1 x EASY Splint Xtra Large
- 1 x Einsatztasche für EASY Splint Set1

Maße: 17 x 12 cm | Gewicht: 313 g



AERoresc® - EASY Splint

Anwendungsbeispiele

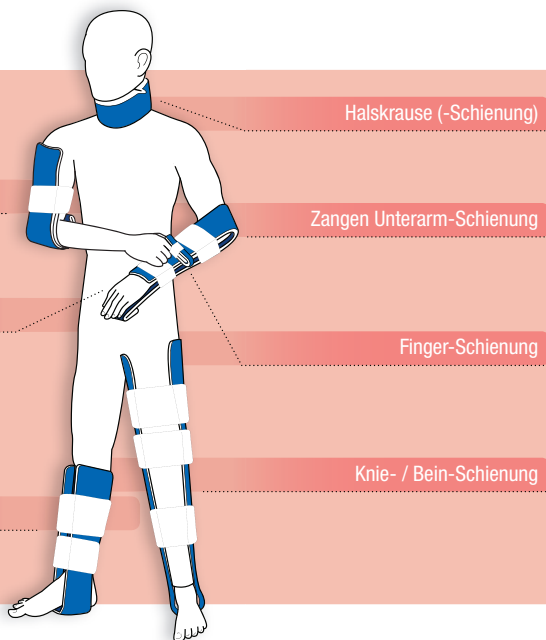

AER0resc® - EASY Splints

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	Größe / Gewicht
EASY Splint XTRA Small / Finger	HIMT02-SP-XS	AER0resc® - EASY Splint XS, Gelb / Blau	5 x 11 cm / 5 g
EASY Splint Medium gerollt	HIMT02-SP-M	AER0resc® - EASY Splint M, Gelb / Blau	50 x 11 cm / 80 g
EASY Splint Xtra Large gerollt	HIMT02-SP-XL	AER0resc® - EASY Splint XL, Gelb / Blau	100 x 11 cm / 160 g

AER0resc® - EASY Splint SET1


EASY Splint SET1	HIMT02-SP-SET1	AER0resc® - EASY Splint SET1, Nylon, Gelb	17 x 12 cm / 313 g
------------------	----------------	---	--------------------

AER0resc® - EASY Splint SET1 | Einzelne Universalschienen zum Auffüllen des Sets

EASY Splint XTRA Small / Finger	HIMT02-SP-XS	AER0resc® - EASY Splint XS, Gelb / Blau	5 x 11 cm / 5 g
EASY Splint Medium gefaltet	HIMT02-SP-M-SET	AER0resc® - EASY Splint XL, Gelb / Blau	50 x 11 cm / 80 g
EASY Splint Xtra Large gefaltet	HIMT02-SP-XL-SET	AER0resc® - EASY Splint XL, Gelb / Blau	100 x 11 cm / 160 g

Weitere Anwendungsbeispiele | Basisformen


C-Curve | Strong

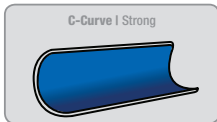

C-Curve

Ziehen Sie für die Wölbung der C-Curve beide Seitenkanten nach innen. Durch diese Form wird der Splint stabil und unbiegsam.


Reverse C-Curve | Stronger

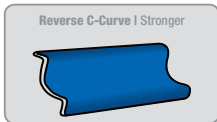

Reverse C-Curve

Formen Sie die EASY Splint C-Curve. Anschließend formen Sie die Seitenkanten in die entgegengesetzte Richtung.

T-Curve | Strongest

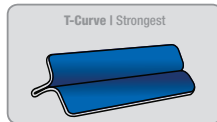

T-Curve

Legen Sie die Seitenkanten übereinander. Biegen Sie dann die Hälfte jeder Seite um, bis die Biegung einen 90° Winkel erreicht hat. Diese Form führt zu einer stark erhöhten Stabilität.



HUM

Gesellschaft für Homecare
und Medizintechnik mbH
Zum Pier 79 | D-44536 Lünen

FON +49 (0)2 31/ 88 08 85-0 | FAX +49 (0)2 31/ 88 08 85-58
Mail: sales@hum-online.de | http://www.hum-online.de



AER0resc® - EASY Splint
PP-IMT02-SP_D | Revision 1 | Stand 21.06.2013
Ausstattungs- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
© HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH